



**Tenga en cuenta lo siguiente al usar el producto.
Asimismo, lea las instrucciones de uso.**


- Pasta lista para usar y que no se endurece para rellenar cavidades y huecos óseos. No es necesario mezclarla, humedecerla ni prepararla de otro modo antes de su aplicación.
- Puede usarse para ampliar el injerto óseo autólogo. Es preciso eliminar el exceso de líquido del injerto óseo antes de realizar la mezcla. El aglutinante podría empezar a disolverse prematuramente si entra en contacto con líquidos durante un periodo prolongado.
- El uso de antibióticos y otros tratamientos involucrados en el procedimiento de implantación debe estar de acuerdo con la práctica clínica rutinaria.
- Hay que realizar un desbridamiento quirúrgico meticuloso y refrescar la superficie del hueso antes de la implantación.

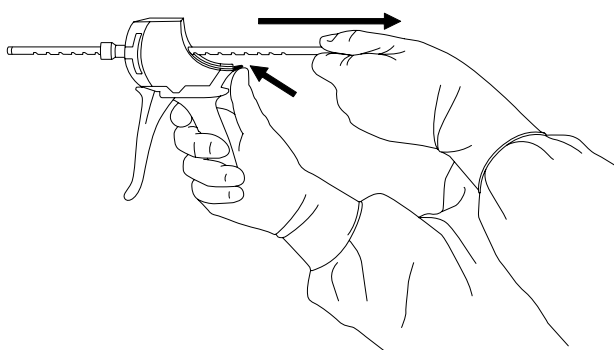


1. Suelte el émbolo del dispensador levantando el pestillo de liberación negro y tire del émbolo hasta la posición de máximo retroceso.

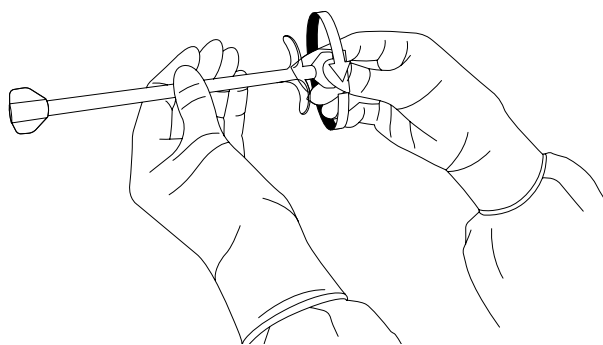

2. Desenrosque el tapón del extremo del cartucho que tiene «aletas».

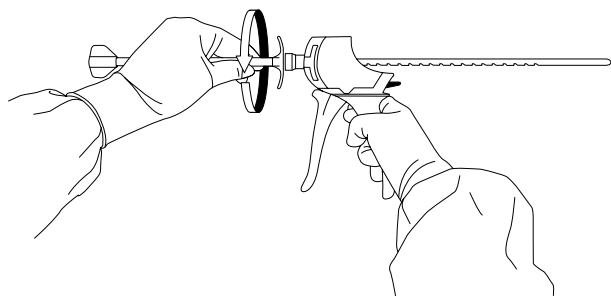

3. Acople el cartucho enroscándolo con firmeza en el dispensador. Desenrosque el segundo tapón del cartucho.

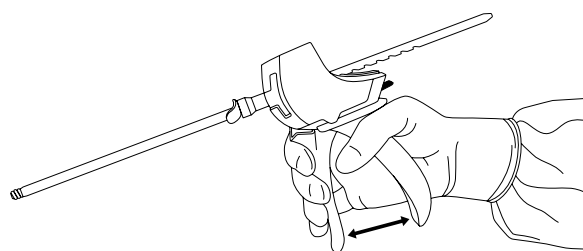

4. Presione el gatillo del dispensador varias veces para que rellene el defecto. Cada vez que se presiona, se administran 0,25 cc.

Basado en las instrucciones de uso de BonAlive[®] putty MIS, versión 91801/1.

Póngase en contacto con nosotros si necesita más ayuda.

Distribuidor

Fabricante



BonAlive Biomaterials Ltd
Biolinja 12, FI-20750 Turku, Finlandia
t. +358 401 77 4400
www.bonalive.com
contact@bonalive.com