



**Veillez tenir compte de ce qui suit lors de l'utilisation du produit.
Veillez aussi lire le mode d'emploi.**


- Pâte prête à l'emploi qui ne durcit pas, permettant de combler les cavités et les espaces osseux. Ne nécessite ni mélange, ni humidification, ni aucune autre préparation avant son application.
- Peut être utilisée pour allonger une greffe osseuse autologue. Tout excédent de liquide doit être correctement enlevé de la greffe osseuse avant de mélanger. Le liant peut commencer à se dissoudre prématurément s'il est en contact avec un liquide pour une durée prolongée.
- Les antibiotiques et autres traitements impliqués après la procédure d'implantation sont à utiliser conformément aux pratiques cliniques habituelles.
- Un débridement chirurgical minutieux doit être effectué et la surface de l'os doit être renouvelée avant l'implantation.

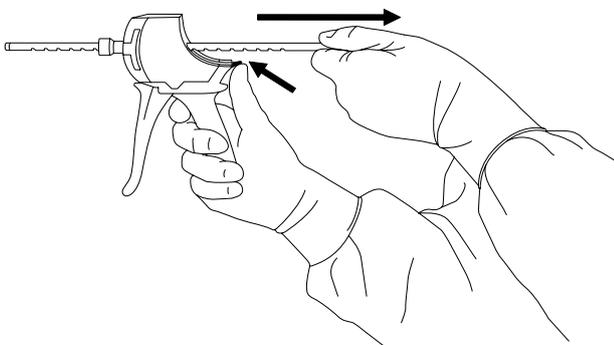


1. Débloquez le piston du distributeur en défaisant le loquet de verrouillage noir et tirez le piston complètement en arrière.

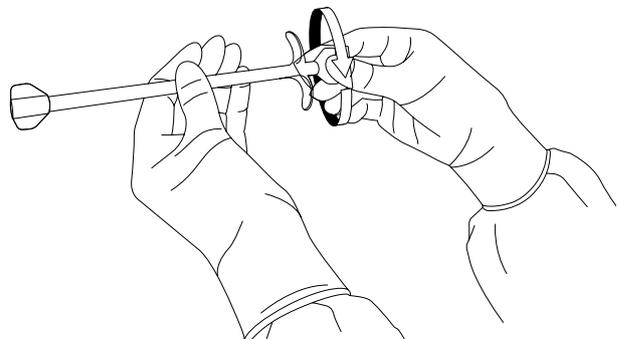

2. Dévissez le bouchon à l'extrémité de la cartouche comportant « des ailes ».

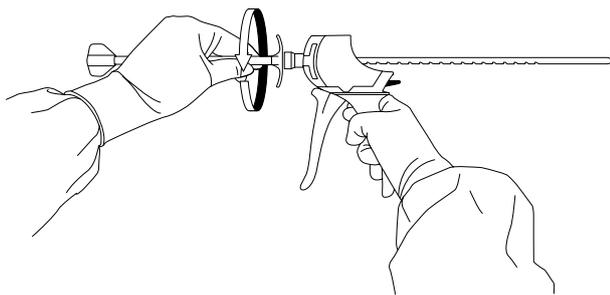

3. Attachez la cartouche en la vissant fermement au distributeur. Dévissez le deuxième bouchon de la cartouche.

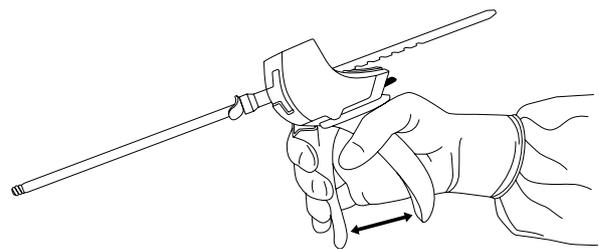

4. Pressez doucement à plusieurs reprises sur la gâchette du distributeur afin de combler le défaut osseux. Chaque pression donne approximativement 0,25 cc.

D'après le mode d'emploi de la pâte BonAlive[®] putty MIS, version 91801/1

Veillez nous contacter si vous avez besoin d'aide supplémentaire,
Distributeur

Fabricant



BonAlive Biomaterials Ltd
Biolinja 12, FI-20750 Turku, Finlande
t. +358 401 77 4400
www.bonalive.com
contact@bonalive.com